

Sada vaginálních dilatátorů Colors Power

Údržba

Údržbu vodotěsných dilatátorů budete mít hotovou během pár minut. Po použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem horké vody. **Dezinfekce pomůcek** odstraní z dilatátoru i mikroskopické nečistoty, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Po pečlivém umytí stačí už jen pomůcku uložit zpátky do krabičky nebo textilního pytlíku tak, aby se nedotýkala jiných ostatních předmětů ve vašem šuplíku, protože různorodé materiály na sebe reagují a poškozují se.



Voděodolnost

Všechny dilatátory v sadě jsou vodotěsné. Proto se snadno čistí a ženy s nimi mohou relaxovat i ve vaně, naložené v horké vodě.

Design a tvar

Barevné, anatomicky tvarované dilatátory připomínají trochu natažené kondomy nebo dopravní kužely. Dva největší z nich jsou uvnitř duté, ostatní plné. Díky oválné patce se pomůcky dobře drží v ruce, takže při trénování se s nimi snadno manipuluje.

Materiál

Dilatátory se vyrábí z kvalitního silikonu, který je na dotek hebký a pevný. Odolá tak i silnému svalovému sevření. K výhodám silikonového materiálu patří taky jeho neporézní a hypoalergenní vlastnosti, kvůli kterým se používá v lékařství.

Barva

Paleta něžných odstínů růžové, červené, modré a fialové působí hravě a energicky. Nabije vás silou a odhodláním překonat vlastní hranice.

Rozměry

Sada dilatátorů nabízí pět různých velikostí od té nejmenší až po největší. Díky takto rozsáhlé škále si ženy procvičí svaly pánevního dna a naučí se je uvolnit.

Mini dilatátor

- Celková délka: 7,2 cm
- Použitelná délka: 6,8 cm
- Nejmenší průměr: 0,8 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Největší průměr: 1,4 cm
- Velikost patky: 3,5 × 6,3 cm
- Hmotnost: 19 g

Malý dilatátor

- Celková délka: 7,7 cm
- Použitelná délka: 7,2 cm
- Nejmenší průměr: 1,2 cm
- Největší průměr: 1,9 cm
- Velikost patky: 4,2 × 6,3 cm
- Hmotnost: 27 g

Střední dilatátor

- Celková délka: 8 cm
- Použitelná délka: 7,4 cm
- Nejmenší průměr: 1,5 cm
- Největší průměr: 2,2 cm
- Velikost patky: 4,3 × 6,3 cm
- Hmotnost: 34 g

Velký dilatátor

- Celková délka: 8 cm
- Použitelná délka: 7,5 cm
- Nejmenší průměr: 1,5 cm
- Největší průměr: 2,5 cm
- Průměr vnitřního otvoru: 1,6 cm
- Velikost patky: 4,6 × 6,3 cm
- Hmotnost: 34 g

Největší dilatátor

- Celková délka: 8,5 cm
- Použitelná délka: 7,5 cm
- Nejmenší průměr: 1,6 cm
- Největší průměr: 3 cm
- Průměr vnitřního otvoru: 1,6 cm
- Velikost patky: 5,3 × 7,5 cm
- Hmotnost: 47 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Bezpečnostní pokyny

- Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
- Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické kondici.
- Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
- Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
- Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
- Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
- Výrobek není vhodný pro komerční použití.
- Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
- Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů nelze v žádném případě převzít odpovědnost.
- dilatátory: nebezpečí poranění močové trubice, nepokračujte přes bolest, používejte dostatečné množství sterilního lubrikačního gelu, nepoužívejte obyčejný lubrikační gel.
- klystýry: nebezpečí poranění konečníku, klystýry napojené na sprchu - přiměřené množství vlažné vody.
- gynekologická zrcadla: nebezpečí poranění pochvy při neobratném zacházení.

www.ruzovyslon.cz

Růžový slon s.r.o. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark